

■ 使用上の注意

- 本製品は、99%カット特殊フィルターを採用したマスクです。
- 日本国内で0.1 μ 微粒子の捕集効率(PFE)を試験し
平均値を捕集。
- マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
- 装着する際ノーズフィット(スポンジのふくらみ)が上側にくるように
ご使用いただき、鼻の隙間を埋めてください。
- 表面に光沢のあるフィルターを外側にし、ご使用ください。
- 個人差により眼鏡が曇る場合がございますので、運転の際は十分に
ご注意ください。
- 超微細な有害物質を止めるフィルターを用いておりますので、
お客様によっては通気性を感じにくいこともございます。万が一、
息苦しく感じる場合はご使用を中止してください。
- 3歳未満のお子様のご使用はお止めください。
- 万が一、かゆみ・カブレなどの症状があらわれた場合には直ちに
ご使用を止め、医師にご相談ください。
- 万が一、ご気分の悪くなった場合は、ご使用を中止してください。
- 着用時にマスクに異常(面体の変形・破損、鼻当てスポンジの不良、
面体内側の汚れ、ゴムバンドの弾性が不足したり、ゴムバンドが切れて
いる)がないことを確認し、異常がある場合は良品と交換してください。
- 力強くマスクを洗濯しないでください。性能の低下及び変形による
漏れが生じます。
- 本品を改造しないでください。改造すると密着性が損なわれ、漏れが生じます
- マスクの着脱は有害な粒子状物質が発生している場所で行わないでください
- カロリー消費量、呼吸筋測定試験：健康状態を維持しながら、食事
制限をせず、当マスク(隙間がない状態で)を使用した場合と、従
来型マスク(隙間がある状態で)を使用した場合の差を求めた結
果によります。(効果には個人差があります。)